

# BMV® KANÜLENDICHTRING FOAM



**Art.-Nr. 109071**

**Art.-Bez. BMV® Kanülendichtring Foam**

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

## Zweckbestimmung

Der BMV® Kanülendichtring Foam dient der Abdichtung eines unebenen Tracheostomas von tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese bei eingesetzter Trachealkanüle.

## Beschreibung

Der BMV® Kanülendichtring Foam (Größe: Ø 5,5 cm x 1 cm) wird auf eine Trachealkanüle geschoben und dient somit der Abdichtung eines unebenen Tracheostomas.

## Nutzungsdauer

Der BMV® Kanülendichtring Foam ist unsteril und ausschließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Der BMV® Kanülendichtring Foam muss täglich, spätestens alle 24 Stunden, ausgetauscht werden. Ist der BMV® Kanülendichtring Foam mit Sekret verunreinigt, kann ein früherer Wechsel notwendig sein.

## Anwendung


Bevor der BMV® Kanülendichtring Foam verwendet wird, ist die entsprechende Hautfläche zu reinigen, z. B. mit BMV® Stoma-Clean Reinigungstücher, Art.-Nr. 123002.

Der BMV® Kanülendichtring Foam wird grundsätzlich in Verbindung mit einer Trachealkanüle verwendet. Der BMV® Kanülendichtring Foam wird auf die Trachealkanüle geschoben, BEVOR die Trachealkanüle eingesetzt wird (Abbildung 1). Eine Trachealkompresse (z. B. BMV® Trachealkompresse, Art.-Nr. 113023) kann zusätzlich zwischen Kanülschild und BMV® Kanülendichtring Foam getragen werden. Nach dem Einsetzen muss die Trachealkanüle mit einem Kanülentrageband (z. B. BMV® Kanülentrageband, Art.-Nr. 112020) gesichert werden (Abbildung 2). So werden Druckstellen und das Herausrutschen der Trachealkanüle vermieden.

**ACHTUNG!** Bitte beachten Sie beim Einsetzen der Trachealkanüle die Anwendungshinweise des Trachealkanülenherstellers!



**Abbildung 1**  
Aufsetzen des BMV® Kanülendichtring Foam auf die Trachealkanüle

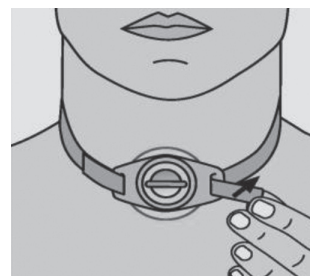

**Abbildung 2**  
Sicherung der Trachealkanüle mit einem BMV® Kanülentrageband

## Kontraindikationen

Momentan sind für den BMV® Kanülendichtring Foam keine Kontraindikationen bekannt.

## Warnhinweise

Sollten Hautirritationen auftreten wie z. B. Juckreiz oder Rötungen ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine allergiebedingte Unverträglichkeit.

Bei einer Mehrfachverwendung oder zu langer Nutzung besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko!

## Sicherheitshinweise

Der BMV® Kanülendichtring Foam darf nicht wiederverwendet werden!

Eine Reinigung und Wiederaufbereitung ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig!

Weist der BMV® Kanülendichtring Foam Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss er entsorgt werden!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 1826980.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 1826980, sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn ([www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

## Lagerung

Der BMV® Kanülendichtring Foam ist trocken aufzubewahren und ist vor Sonnenlicht zu schützen.

## Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

## Piktogramm-Legende

	Hersteller		Verwendbar bis
	Artikelnummer		Nicht steril
	Fertigungslosnummer, Charge		Vor Sonnenlicht schützen
	Einmalige Produktkennung		Trocken aufbewahren
	Medizinprodukt		Packungsinhalt
	CE-Kennzeichnung		Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht wiederverwenden		



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much  
Telefon: +49 2245 610940  
[info@bmv-med.de](mailto:info@bmv-med.de) · [www.bmv-med.de](http://www.bmv-med.de)