

# GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR BMV® STOMA-ÖL



## BMV® Stoma-Öl

Art.-Nr.: 123000, 50 ml

Die Gebrauchsanleitung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung. Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen.

### Zweckbestimmung:

Das BMV® Stoma-Öl dient zur Erleichterung des Einführens der Trachealkanüle. Es erhöht die Gleitfähigkeit der Trachealkanüle beim Einführen. Es dient weiterhin der Hautpflege rund um das Tracheostoma.

### Beschreibung:

Das BMV® Stoma-Öl ist ein neutrales Gleitöl, das in seiner Zusammensetzung aus mittelkettigen Triglyceriden besteht.

### Anwendung:

Vor dem Einführen gibt man einige Tropfen BMV® Stoma-Öl auf eine Kompresse und reibt damit die Kanüle und die Ränder des Tracheostomas ein.

Zur besseren Dosierung wird das BMV® Stoma-Öl in Tropfflaschen mit Schraubverschluss geliefert.

### SICHERHEITSHINWEISE

Das BMV® Stoma-Öl ist unsteril verpackt und hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Es darf ab dem Zeitpunkt der Öffnung des Fläschchens einen Monat verwendet werden.

#### Nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich fließendem Wasser spülen.

#### Nach Verschlucken:

Viel Wasser trinken lassen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Sollte es zu Schwierigkeiten mit dem Produkt kommen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

0800 1826980

### Lagerung:

Das BMV® Stoma-Öl ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

### Entsorgung:

Wird der Patient zu Hause versorgt, so ist davon auszugehen, dass er nicht infektiös ist. Daher ist in diesem Fall eine Entsorgung über den normalen Hausmüll möglich. Wird der Patient im Krankenhaus durch ärztliches Fachpersonal behandelt, so ist der Entsorgungsweg für am Patienten eingesetztes (evtl. infektiöses) Gut gesetzlich geregelt. Auf diesem Weg wird das BMV® Stoma-Öl in der Praxis oder in der Klinik entsorgt.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23  
53804 Much  
Germany  
info@bmv-med.de  
www.bmv-med.de

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

