

BMV® SCHUTZTEXTILIEN

Art.-Nr. 131XXX-BMLX, Art.-Bez. BMV® Schutzlätzchen (Erwachsene/Kinder, Klettverschluss, diverse Farben, mehrlagig)

Art.-Nr. 13200X-BMTXXX(X), Art.-Bez. BMV® Larynx-Schutztuch (Erwachsene/Kinder, Klettverschluss, diverse Farben/Materialien)

Art.-Nr. 133001-BMRSR(X), Art.-Bez. BMV® Larynx-Schutzrolli, Shirtform mit Reißverschluss (diverse Farben)

Art.-Nr. 133101-BMRSX(X), Art.-Bez. BMV® Larynx-Schutzrolli, Shirtform (diverse Farben)

Art.-Nr. 133201-BMRX(X), Art.-Bez. BMV® Larynx Schutzrolli mit Klettverschluss (diverse Farben)

(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Zweckbestimmung

BMV® Schutzlätzchen/Schutztuch/Schutzrolli dienen zum Schutz des Tracheostomas bei tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten (Erwachsene/Kinder).

Beschreibung

Die BMV® Schutztextilien dienen dem Schutz des Tracheostomas. Sie verhindern, dass Staub- oder Schmutzpartikel in die Luftröhre gelangen und sorgen für eine ästhetische Abdeckung des Tracheostomas. Die verschiedenen Varianten der BMV® Schutztextilien sind nachfolgend aufgeführt:

BMV® Larynx-Schutzlätzchen mit Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Trageband (Baumwolle) und Klettverschluss (Polyamid 6/6), Halsweite über die verstellbaren Clips (Polycarbonat) einstellbar (Erwachsene: 35-45 cm, Kinder 28-35 cm)
- vier Stärken (3, 4, 8 und 12 Stofflagen)
- diverse Farben

BMV® Larynx-Schutztuch mit Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Material: Baumwolle, Polyester oder einer Baumwolle/Polyestermischung und Klettverschluss (Polyamid 6/6), Halsweite mit dem Klettverschluss einstellbar (Erwachsene: 33-42 cm, Kinder 28-34 cm)
- diverse Farben

BMV® Larynx-Schutzrolli Shirtform, mit/ohne Reißverschluss/Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Material: Baumwolle oder Baumwolle/Viskose mit Elasthan
- diverse Farben

Nutzungsdauer

Die BMV® Schutztextilien sind unsterile Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

BMV® Schutztextilien müssen täglich, spätestens alle 24 Stunden, ausgewechselt werden. Sind die BMV® Schutztextilien mit Sekret verunreinigt, kann ein früherer Wechsel notwendig sein.

Die Dauer der Verwendung der BMV® Schutztextilien unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, die BMV® Schutztextilien bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten durch eine neue BMV® Schutztextilie zu ersetzen.

Anwendung

Das BMV® Larynx-Schutzlätzchen wird wie ein Halstuch getragen. Der Halsumfang kann über die verstellbaren Clips und den Klettverschluss eingestellt werden.

Das BMV® Schutztuch wird wie ein Halstuch getragen. Der Halsumfang kann über den Klettverschluss eingestellt werden.

Der BMV® Larynx-Schutzrolli wird je nach Ausführung wie ein Lätzchen hinten mit einem Klettverschluss/seitlichem Reißverschluss geschlossen oder wie ein Shirt über den Kopf gezogen und unter dem Hemd oder der Bluse getragen.

Reinigung

Zur Reinigung wird die BMV® Schutztextilie bei 30° in der Waschmaschine mit einem Pflegewaschmittel gewaschen. Klettverschlüsse beim Waschen geschlossen halten, um die Verschlusskraft zu erhalten. Die BMV® Schutztextilie ist erst nach vollständiger Trocknung zu lagern bzw. wieder zu verwenden!

Kontraindikationen

Momentan sind für die BMV® Schutztextilien keine Kontraindikationen bekannt.

Warnhinweise

Es besteht die Gefahr von Infektionen oder Hautirritationen, wenn die BMV® Schutztextilie nicht im vorgegebenen Zeitraum gewechselt wird, denn absorbierte Feuchtigkeit und Sekret können zu Bakterienwachstum führen!

Ein zu strammes Anlegen der BMV® Schutztextilie kann zu Druckstellen am Hals führen!

Sicherheitshinweise

Weist eine BMV® Schutztextilie Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, **MUSS** diese entsorgt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung der BMV® Schutztextilie ist unzulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

0800 1826980.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 1826980 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Lagerung

BMV® Schutztextilien sind trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Entsorgung




Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Piktogramm-Legende

 Hersteller	 CE-Kennzeichnung	 Trocken aufbewahren
 Artikelnummer	 Einzelner Patient – mehrfach anwendbar	 Packungsinhalt
 Fertigungslosnummer, Charge	 Verwendbar bis	 Gebrauchsanweisung beachten
 Einmalige Produktkennung	 Nicht steril	
 Medizinprodukt	 Vor Sonnenlicht schützen	



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much
Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de