

BMV® STOMA-QUICK

Art.-Nr. 1340XX, Art.-Bez. BMV® Stoma-Quick (beige/weiß, diverse Ausführungen)
(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Zweckbestimmung

Das BMV® Stoma-Quick schützt das Tracheostoma von laryngektomierten Patienten oder tracheotomierten Patienten mit epithelisiertem Tracheostoma nach der Entwöhnung von der Trachealkanüle. Es befeuchtet, erwärmt und filtert die Atemluft. Außerdem wird der Auswurf von Sekrettröpfchen zurückgehalten.

Beschreibung

Das BMV® Stoma-Quick wird, nach der Entwöhnung von der Trachealkanüle, sowohl bei laryngektomierten Patienten als auch tracheotomierten Patienten mit epithelisiertem Tracheostoma (= stabil vernähtes Tracheostoma) verwendet. Es ersetzt zum Teil die Funktionen einer Nase, indem es die Atemluft befeuchtet und erwärmt. Außerdem werden Staub und Schmutz vom Tracheostoma ferngehalten und der Auswurf von Sekrettröpfchen zurückgehalten.

Das BMV® Stoma-Quick ist in verschiedenen Größen (5 x 7 cm, 7 x 7 cm, 10 x 8 cm), mit ein oder zwei Klebestreifen und in beige oder weiß erhältlich.

Das BMV® Stoma-Quick kann während einer Bestrahlung getragen werden.

Nutzungsdauer

Das BMV® Stoma-Quick ist unsteril und ausschließlich zur einmaligen Anwendung vorgesehen. Aus hygienischen Gründen ist es alle 12 Stunden, bei starker Sekretion auch mehrmals täglich, zu wechseln.

Allgemein gilt, ist das BMV® Stoma-Quick durchnässt oder beschädigt, ist es sofort auszutauschen!

Anwendung

Bevor das BMV® Stoma-Quick verwendet wird, ist die Hautfläche zu reinigen, z. B. mit BMV® Stoma-Clean Reinigungstücher, Art.-Nr. 123002.

Für die Verwendung eines BMV® Stoma-Quick wird der Schutzstreifen von der Klebefläche auf der Rückseite entfernt und das BMV® Stoma-Quick mittig auf das Tracheostoma aufgeklebt, siehe Abbildungen 1 und 2.

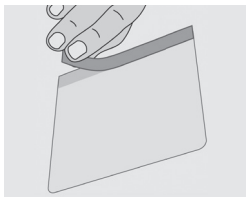


Abbildung 1

Entfernung des Schutzstreifens von der Klebefläche eines BMV® Stoma-Quick

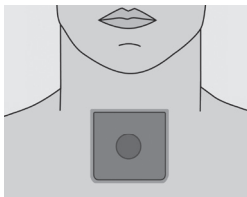


Abbildung 2

Aufkleben eines BMV® Stoma-Quick mittig auf das Tracheostoma.

Kontraindikation

Das BMV® Stoma-Quick ist nicht für Punktionstracheostoma geeignet.

Warnhinweise

Sollten Hautirritationen (z. B. Juckreiz oder Rötungen) auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine allergiebedingte Unverträglichkeit.

Bei einer Mehrfachanwendung oder zu langer Nutzung besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Sicherheitshinweise

Weist das BMV® Stoma-Quick Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss es entsorgt werden!

BMV® Stoma-Quick dürfen nicht wiederverwendet werden!

Eine Reinigung und Wiederaufbereitung ist aus hygienischen Gründen nicht zulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 1826980.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 1826980 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Lagerung

Das BMV® Stoma-Quick ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Piktogramm-Legende

	Hersteller		CE-Kennzeichnung		Vor Sonnenlicht schützen
	Artikelnummer		Nicht wiederverwenden		Trocken aufbewahren
	Fertigungslosnummer, Charge		Verwendbar bis		Packungsinhalt
	Einmalige Produktkennung		Nicht steril		Gebrauchsanweisung beachten



 BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much
Tel.: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de