

## Art.-Nr. 135001-01, Art.-Bez. BMV® Duscheschutz Standard

## Art.-Nr. 135001-02, Art.-Bez. BMV® Duscheschutz Kind

## Art.-Nr. 135003-01, Art.-Bez. BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

### Zweckbestimmung

Der BMV® Duscheschutz schützt das Tracheostoma von tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten (Erwachsene, Kinder) vor Spritzwasser. Der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme ist mit einer Trachealkanüle mit 22 mm Aufnahme oder einem BMV® Tracheostomapflaster Spezial zu verwenden.

### Beschreibung

Der BMV® Duscheschutz dient dem Schutz des Tracheostomas beim Duschen. Er verhindert, dass Spritzwasser in die Luftröhre gelangt. Abhängig von der Variante kann er bei Erwachsenen (BMV® Duscheschutz Standard, BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme) oder Kindern (BMV® Duscheschutz Kind) angewendet werden.

### Nutzungsdauer

Alle Varianten des BMV® Duscheschutz sind unsterile Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

Die Dauer der Verwendung des BMV® Duscheschutz unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, den BMV®

Duscheschutz bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten durch einen neuen BMV® Duscheschutz zu ersetzen.


### Anwendung

#### BMV® Duscheschutz Standard/Kind

Der BMV® Duscheschutz Standard/Kind wird über dem Tracheostoma um den Hals gelegt und mit dem Klettverschluss im Nacken verschlossen, so dass der BMV® Duscheschutz Standard/Kind ausreichend dicht anliegt. Im Falle des Vorhandenseins einer Trachealkanüle werden eventuell adaptierte Komponenten abgenommen und der BMV® Duscheschutz Standard/Kind über der Trachealkanüle angelegt. Ein Duschen ist jetzt möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Wasserstrahl niemals direkt auf den BMV® Duscheschutz Standard/Kind gerichtet wird. Durch den direkten Zufluss von Wasser kann es zu einer **lebensbedrohlichen Situation** kommen! Daher wird empfohlen, den Duschkopf maximal auf Brusthöhe zu halten/einzustellen.

#### BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme

Der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme wird in die 22 mm Aufnahme einer Trachealkanüle oder eines BMV® Tracheostomapflasters Spezial (Art.-Nr. 137030-XX) gesteckt, Abbildung 1. Ein Duschen ist jetzt möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Wasserstrahl niemals direkt auf den BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme gerichtet wird. Durch den direkten Zufluss von Wasser kann es zu einer **lebensbedrohlichen Situation** kommen! Daher wird empfohlen den Duschkopf maximal auf Brusthöhe zu halten/einzustellen.

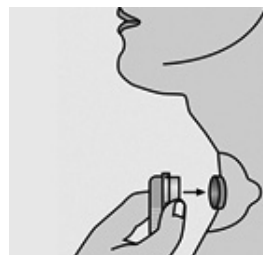

**Abbildung 1:**

Konnection des BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme auf ein BMV® Tracheostomapflaster Spezial (Art.-Nr. 137030-XX)

**ACHTUNG:** Bei Anwendung des BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme kann sich dieser mit abgehustetem Sekret zusetzen. Die Atmung kann dadurch erheblich erschwert werden. In solchen Fällen ist der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme außerhalb der Dusche abzunehmen und zu reinigen.

### Reinigung

Nach jeder Benutzung muss der BMV® Duscheschutz gründlich unter fließendem handwarmem Wasser (Trinkwasserqualität) gereinigt werden. Dafür kann zusätzlich eine pH-neutrale Waschlotion verwendet werden. Anschließend muss der BMV® Duscheschutz vollständig getrocknet werden, z.B. mit einem fusselfreien Tuch.

**ACHTUNG:** Es dürfen KEINE Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung des BMV® Duscheschutz verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung des BMV® Duscheschutz und ist somit nicht zulässig!

### Kontraindikationen

Momentan sind für den BMV® Duscheschutz keine Kontraindikationen bekannt.

### Warnhinweise

Der BMV® Duscheschutz darf **NICHT** zum Baden oder Schwimmen getragen werden! **LEBENSGEFAHR!!!**

Den Wasserstrahl der Dusche **NICHT** direkt auf den BMV® Duscheschutz richten! **LEBENSGEFAHR!!!**

Ein zu strammes Anlegen des BMV® Duscheschutz Standard/Kind kann zu Druckstellen am Hals führen!

Sollten bei der Anwendung des BMV® Duscheschutz unerwartete Nebenwirkungen auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

## Sicherheitshinweise

Der BMV® Duscheschutz bietet nur Schutz vor Spritzwasser!

Weist der BMV® Duscheschutz Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss dieser entsorgt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung des BMV® Duscheschutz ist unzulässig.

Bei Anwendung des BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme kann sich dieser mit abgehustetem Sekret zusetzen. Die Atmung kann dadurch erheblich erschwert werden. In solchen Fällen ist der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme außerhalb der Dusche abzunehmen und zu reinigen.

Es dürfen KEINE Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung des BMV® Duscheschutz und ist somit nicht zulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter: 0800 1826980.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 1826980 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn ([www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

## Lagerung

Der BMV® Duscheschutz ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

## Entsorgung














Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

## Piktogramm-Legende

	Hersteller
	Artikelnummer
	Fertigungslosnummer, Charge
	Einmalige Produktkennung
	Medizinprodukt
	CE-Kennzeichnung
	Einzelner Patient – mehrfach anwendbar
	Verwendbar bis
	Nicht steril
	Trocken aufbewahren
	Vor Sonnenlicht schützen
	Packungsinhalt
	Gebrauchsanweisung beachten



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much  
Telefon: +49 2245 610940  
[info@bmv-med.de](mailto:info@bmv-med.de) · [www.bmv-med.de](http://www.bmv-med.de)