

BMV® NASEN- UND RIECHSCHLAUCH

Art.-Nr. 152010, Art.-Bez. BMV® Nasen- und Riechschlauch mit Tracheal-Halsmaske

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Zweckbestimmung

Der BMV® Nasen- und Riechschlauch kann bei laryngektomierten Patienten zur Herstellung einer Verbindung zwischen Tracheostoma und Mund-/Nasenraum eingesetzt werden, wodurch das Atmen durch die Nase und somit das Riechen ermöglicht wird.

Beschreibung

Der BMV® Nasen- und Riechschlauch besteht aus einer Tracheal-Halsmaske (Silikon), einem flexiblen Faltenschlauch von 38 cm Länge und einem abnehmbaren Mundstück. Die Tracheal-Halsmaske dient dem dichten Ansatz des BMV® Nasen- und Riechschlauchs auf das Tracheostoma. Der flexible Faltenschlauch stellt die Verbindung zwischen Maske und Mund her und das Mundstück ermöglicht durch die anatomische Formgebung das Ansetzen des Mundes beim Atmungsvorgang. Die Tracheal-Halsmaske ist über einen 15 mm Anschlussadapter an den Faltenschlauch konnektiert. Wird die Tracheal-Halsmaske entfernt, kann der Anschlussadapter zur Konnektion an eine Trachealkanüle oder an ein Tracheostomapflaster (mit 15 mm Normkonnektor) benutzt werden.

Durch die Anwendung des BMV® Nasen- und Riechschlauchs wird die normale Belüftung der Mund- und Nasenschleimhaut ermöglicht. Die Atemluft kann durch die Nase eingeatmet werden, wodurch das Riechen ermöglicht wird. Die eingeatmete Luft gelangt über Nase, Rachen- und Mundhöhle zum Mundstück des BMV® Nasen- und Riechschlauchs und von dort über den Faltenschlauch durch das Tracheostoma in die Lunge. Beim Ausatmen wird der Luftstrom in umgekehrter Reihenfolge zurückgeführt und ermöglicht das Schnäuzen der Nase.

Nutzungsdauer

Der BMV® Nasen- und Riechschlauch und die Tracheal-Halsmaske sind ein unsteriles Ein-Patienten-Produkt, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

Die Dauer der Verwendung des BMV® Nasen- und Riechschlauchs und der Tracheal-Halsmaske unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, den BMV® Nasen- und Riechschlauch und die Tracheal-Halsmaske bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten zu ersetzen. Bei Sekretrückständen in den Falten des BMV® Nasen- und Riechschlauchs, die sich nicht durch ein Abspülen entfernen lassen, ist ein vorzeitiger Austausch aus hygienischen Gründen notwendig!

Anwendung

BMV® Nasen- und Riechschlauch mit Tracheal-Halsmaske

Das Mundstück des BMV® Nasen- und Riechschlauchs fest mit den Lippen umschließen und die am Adapter konnektierte Tracheal-Halsmaske dicht auf das Tracheostoma aufsetzen. Anschließend durch die Nase atmen. Während der Anwendung muss die Tracheal-Halsmaske mit einer Hand festgehalten werden.

BMV® Nasen- und Riechschlauch konnektiert an eine Trachealkanüle oder ein Tracheostomapflaster

Vor der Konnektierung mit einer Trachealkanüle/einem Tracheostomapflaster ist die Tracheal-Halsmaske vom Adapter des BMV® Nasen- und Riechschlauchs zu entfernen. Anschließend wird der Adapter des BMV® Nasen- und Riechschlauchs auf den 15 mm Normkonnektor einer Trachealkanüle oder eines Tracheostomapflasters gesteckt. Durch die Konnektierung wird eine feste und luftdichte Verbindung zum Tracheostoma hergestellt, die leicht durch ein Abziehen des Adapters wieder gelöst werden kann. Jetzt das Mundstück des BMV® Nasen- und Riechschlauchs fest mit den Lippen umschließen und durch die Nase atmen.

Reinigung

Nach jeder Benutzung muss der BMV® Nasen- und Riechschlauch und die Tracheal-Halsmaske (im Falle der Verwendung) gründlich unter fließendem handwarmem Wasser (Trinkwasserqualität) gereinigt werden. Anschließend ist der BMV® Nasen- und Riechschlauch und ggf. die Tracheal-Halsmaske vollständig zu trocknen (Lufttrocknung).

Es dürfen keine Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung des BMV® Nasen- und Riechschlauchs und ist somit nicht zulässig!

Kontraindikationen

Keine Anwendung bei tracheotomierten Patienten (kein Nutzen).

Bei erhöhter Sekretionsbildung ist der BMV® Nasen- und Rienschlauch nicht zu verwenden!

Warnhinweise

Sollten bei der Anwendung des BMV® Nasen- und Rienschlauchs unerwartete Nebenwirkungen auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

Bei langer Nutzung des BMV® Nasen- und Rienschlauchs besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko!

Sicherheitshinweise

Weist der BMV® Nasen- und Rienschlauch und/oder die Tracheal-Halsmaske Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, muss das Produkt entsorgt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung des BMV® Nasen- und Rienschlauchs (und der Tracheal-Halsmaske) ist unzulässig.

Es dürfen keine Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation ist nicht zulässig!

Bei Schwierigkeiten mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:

0800 1826980.

Sollte es durch die Anwendung des Produktes zu einer vorübergehenden oder dauerhaften schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod des Patienten, Anwenders oder Dritter kommen, melden Sie das Vorkommnis bitte umgehend an unseren Kundenservice unter Telefonnummer 0800 1826980 sowie an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 53175 Bonn (www.bfarm.de, Bereich Medizinprodukte, Risiken melden).

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Lagerung

Der BMV® Nasen- und Rienschlauch ist trocken aufzubewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Entsorgung














Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Piktogramm-Legende

 Hersteller	 CE-Kennzeichnung	 Trocken aufbewahren
 Artikelnummer	 Einzelner Patient – mehrfach anwendbar	 Packungsinhalt
 Fertigungslosnummer, Charge	 Verwendbar bis	 Gebrauchsanweisung beachten
 Einmalige Produktkennung	 Nicht steril	
 Medizinprodukt	 Vor Sonnenlicht schützen	



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much
Telefon: +49 2245 610940
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de