

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR BMV® PFLEGE- UND DESINFEKTIONS-LÖSUNG



BMV® Pflege- und Desinfektionslösung ART.-NR.: 121000

Die Gebrauchsanleitung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patienten / Anwendern zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

ZWECKBESTIMMUNG:

Die BMV® Pflege- und Desinfektionslösung dient der Reinigung und Desinfektion von Kunststoff-, Silikon- und Silber-Trachealkanülen.

ANWENDUNG:

Es kommen unterschiedliche BMV® Pflege- und Desinfektionslösungen zur Anwendung (siehe Abbildungen).

BMV® Kanülenreinigungsdose mit Siebeinsatz (Art.-Nr. 121002):

400 ml Fassungsvermögen, geeignet für ungeblockte Trachealkanülen.

BMV® Kanülenreinigungsdose mit Spüldeckeleinsatz (Art.-Nr. 121004):

500 ml Fassungsvermögen, mit speziellem Spüldeckeleinsatz besonders geeignet für geblockte Trachealkanülen.

Die Einwirkzeit beträgt 1 Stunde. Die Einwirkzeit muss unbedingt eingehalten werden und darf nicht überschritten werden. Nehmen Sie nach Ablauf der Einwirkzeit die Trachealkanüle aus der Reinigungsdose. Spülen Sie die Trachealkanüle und auch die Dose gründlich unter fließendem Wasser ab. Anschließend wird die Trachealkanüle mit einem weichen, fusselfreien Tuch abgetrocknet.

SICHERHEITSHINWEIS:

Beim Umgang mit der BMV® Pflege- und Desinfektionslösung sind Handschuhe zu tragen.

Nach der Anwendung ist die Flasche zu schließen. Durch Einatmen der Lösung können Haut- und Schleimhautreizungen hervorgerufen werden.

Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen bzw. abwaschen. Wurde die Lösung verschluckt, ist viel Wasser zu trinken und sofort ein Arzt aufzusuchen.

Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum, das auf dem Etikett angegeben wird. Nach Ablauf dieses Haltbarkeitsdatums ist die BMV® Pflege- und Desinfektionslösung nicht mehr anzuwenden. Einmal benutzte Lösungen dürfen nicht wiederverwendet werden und sind zu entsorgen.

Weitere Hinweise finden Sie auf dem Flaschenetikett.

ENTSORGUNG:

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 23
53804 Much
Germany
info@bmv-med.de
www.bmv-med.de

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Abbildung 1

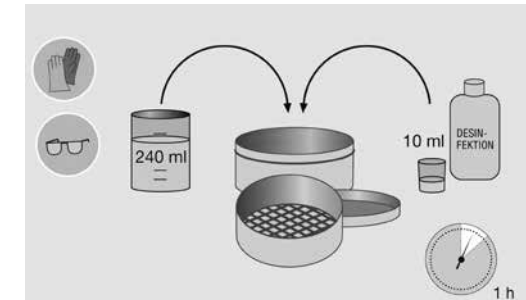


Abbildung 2

