

BMV® SCHUTZTEXTILIEN

Art.-Nr.:	Art.-Bez.:
131XX-BMLX	BMV® Schutzlätzchen (Erwachsene/Kinder, Klettverschluss, diverse Farben, mehrlagig)
13200X-BMTXXX(X)	BMV® Larynx-Schutztuch (Erwachsene/Kinder, Klettverschluss, diverse Farben/Materialien)
133001-BMRSR(X)(X)	BMV® Larynx-Schutzrolli, Shirtform mit Reißverschluss (diverse Farben)
133101-BMRSX(X)	BMV® Larynx-Schutzrolli, Shirtform (diverse Farben)
133201-BMRX(X)	BMV® Larynx Schutzrolli mit Klettverschluss (diverse Farben)

(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung. Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren.

Produkt „Made in Germany“

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.















BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
Gewerbegebiet Bitzen 21-23 · 53804 Much, Germany
Telefon: +49 2245 · 610 940
Kundenservice Telefon: 0800 1826980
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de

920232 Rev. DE0C 2025-06-06

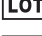

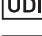Piktogramm-Legende

	Hersteller		CE-Kennzeichnung		Trocken aufbewahren
	Katalognummer		Zur Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten		Packungsinhalt
	Chargenbezeichnung		Verwendbar bis		Gebrauchsanweisung beachten
	Eindeutige Produktidentifizierung		Vor Sonnenlicht schützen		
	Medizinprodukt				

Zweckbestimmung

BMV® Schutzlätzchen/Schutztuch/Schutzrolli dienen zum Schutz des Tracheostomas bei tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten (Erwachsene/Kinder).

Kontraindikationen

Momentan sind für die BMV® Schutztextilien keine Kontraindikationen bekannt.

Warnhinweise

Es besteht die Gefahr von Infektionen oder Hautirritationen, wenn die BMV® Schutztextilie nicht im vorgegebenen Zeitraum gewechselt wird, denn absorbierte Feuchtigkeit und Sekret können zu Bakterienwachstum führen!

Ein zu strammes Anlegen der BMV® Schutztextilie kann zu Druckstellen am Hals führen!

Sicherheitshinweise

Weist eine BMV® Schutztextilie Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, darf diese nicht verwendet werden bzw. muss unverzüglich durch ein neues Produkt gleicher Art ersetzt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung der BMV® Schutztextilie ist unzulässig!

Beschreibung

Die BMV® Schutztextilien dienen dem Schutz des Tracheostomas. Sie verhindern, dass Staub- oder Schmutzpartikel in die Luftröhre gelangen und sorgen für eine ästhetische Abdeckung des Tracheostomas. Die verschiedenen Varianten der BMV® Schutztextilien sind nachfolgend aufgeführt:

BMV® Larynx-Schutzlätzchen mit Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Trageband (Baumwolle) und Klettverschluss (Polyamid 6/6), Halsweite über die verstellbaren Clips (Polycarbonat) einstellbar (Erwachsene: 35-45 cm, Kinder 28-35 cm)
- vier Stärken (3, 4, 8 und 12 Stofflagen)
- diverse Farben

BMV® Larynx-Schutztuch mit Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Material: Baumwolle, Polyester oder einer Baumwolle/Polyestermischung und Klettverschluss (Polyamid 6/6), Halsweite mit dem Klettverschluss einstellbar (Erwachsene: 33-42 cm, Kinder 28-34 cm)
- diverse Farben

BMV® Larynx-Schutzrolli Shirtform, mit/ohne Reißverschluss/Klettverschluss:

- Diolentüllfutter als Sekretschutz (Polyester)
- Material: Baumwolle oder Baumwolle/Viskose mit Elasthan
- diverse Farben

Nutzungsdauer

Die BMV® Schutztextilien sind Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

BMV® Schutztextilien müssen täglich, spätestens alle 24 Stunden, ausgewechselt werden. Sind die BMV® Schutztextilien mit Sekret verunreinigt, kann ein früherer Wechsel notwendig sein.

Die Dauer der Verwendung der BMV® Schutztextilien unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, die BMV® Schutztextilien bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten durch eine neue BMV® Schutztextilie zu ersetzen.

Anwendung

Das BMV® Larynx-Schutzlätzchen wird wie ein Halstuch getragen. Der Halsumfang kann über die verstellbaren Clips und den Klettverschluss eingestellt werden.

Das BMV® Schutztuch wird wie ein Halstuch getragen. Der Halsumfang kann über den Klettverschluss eingestellt werden.

Der BMV® Larynx-Schutzrolli wird je nach Ausführung wie ein Lätzchen hinten mit einem Klettverschluss/seitlichem Reißverschluss geschlossen oder wie ein Shirt über den Kopf gezogen und unter dem Hemd oder der Bluse getragen.

Reinigung

Zur Reinigung wird die BMV® Schutztextilie bei 30° in der Waschmaschine mit einem Pflegewaschmittel gewaschen. Klettverschlüsse beim Waschen geschlossen halten, um die Verschlusskraft zu erhalten. Die BMV® Schutztextilie ist erst nach vollständiger Trocknung zu lagern bzw. wieder zu verwenden!

Lagerung

BMV® Schutztextilien sind trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

Entsorgung

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

Rechtliche Hinweise

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber. Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.