

# BMV® DUSCHESCHUTZ



## Art.-Nr. Art.-Bez.

- 135001-01 **BMV® Duscheschutz Standard**
- 135001-02 **BMV® Duscheschutz Kind**
- 135003-01 **BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme**

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung. Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren!

Produkt „Made in Germany“

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much, Germany  
Telefon: +49 2245 · 610 940  
Kundenservice Telefon: 0800 1826980  
info@bmv-med.de · www.bmv.de

920238 Rev. DEOC 2024-09-18



## Piktogramm-Legende

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Hersteller  | Verwendbar bis              |
| Katalognummer                                     | Vor Sonnenlicht schützen    |
| Chargenbezeichnung                                | Trocken aufbewahren         |
| Eindeutige Produktidentifizierung                 | Packungsinhalt              |
| Medizinprodukt                                    | Gebrauchsanweisung beachten |
| CE-Kennzeichnung                                  |                             |
| Zur Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten |                             |

## Zweckbestimmung

Der BMV® Duscheschutz schützt das Tracheostoma von tracheotomierten oder laryngektomierten Patienten (Erwachsene, Kinder) vor Spritzwasser. Der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme ist mit einer Trachealkanüle mit 22 mm Aufnahme oder einem BMV® Tracheostomapflaster Spezial zu verwenden.

## Kontraindikationen

Momentan sind für den BMV® Duscheschutz keine Kontraindikationen bekannt.

## Warnhinweise

Der BMV® Duscheschutz darf **NICHT** zum Baden oder Schwimmen getragen werden! **LEBENSGEFAHR!!!**

Den Wasserstrahl der Dusche **NICHT** direkt auf den BMV® Duscheschutz richten! **LEBENSGEFAHR!!!**

Ein zu strammes Anlegen des BMV® Duscheschutz Standard/Kind kann zu Druckstellen am Hals führen!

Bei Anwendung des BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme kann sich dieser mit abgehustetem Sekret zusetzen. Die Atmung kann dadurch erheblich erschwert werden. In solchen Fällen ist der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme außerhalb der Dusche abzunehmen und zu reinigen.

Sollten bei der Anwendung des BMV® Duscheschutz unerwartete Nebenwirkungen auftreten, ist das Produkt sofort abzusetzen und ein Arzt zu konsultieren.

## Sicherheitshinweise

Weist der BMV® Duscheschutz Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, darf dieser nicht verwendet werden bzw. muss unverzüglich durch ein neues Produkt gleicher Art ersetzt werden!

Der BMV® Duscheschutz bietet nur Schutz vor Spritzwasser!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung des BMV® Duscheschutz ist unzulässig.

Es dürfen KEINE Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel für die Reinigung verwendet werden!

Eine Reinigung durch Erhitzen, Auskochen oder Dampfsterilisation führt zu einer Beschädigung des BMV® Duscheschutz und ist somit nicht zulässig!

## Beschreibung

Der BMV® Duscheschutz dient dem Schutz des Tracheostomas beim Duschen. Er verhindert, dass Spritzwasser in die Luftröhre gelangt. Abhängig von der Variante kann er bei Erwachsenen (BMV® Duscheschutz Standard, BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme) oder Kindern (BMV® Duscheschutz Kind) angewendet werden.

## Nutzungsdauer

Alle Varianten des BMV® Duscheschutz sind Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachanwendung bestimmt sind.

Die Dauer der Verwendung des BMV® Duscheschutz unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, den BMV® Duscheschutz bei entsprechender regelmäßiger Reinigung nach 3 Monaten durch einen neuen BMV® Duscheschutz zu ersetzen.

## Anwendung

### BMV® Duscheschutz Standard/Kind


Der BMV® Duscheschutz Standard/Kind wird über dem Tracheostoma um den Hals gelegt und mit dem Klettverschluss im Nacken verschlossen, so dass der BMV® Duscheschutz Standard/Kind ausreichend dicht anliegt. Im

Falle des Vorhandenseins einer Trachealkanüle werden eventuell adaptierte Komponenten abgenommen und der BMV® Duscheschutz Standard/Kind über der Trachealkanüle angelegt. Ein Duschen ist jetzt möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Wasserstrahl niemals direkt auf den BMV® Duscheschutz Standard/Kind gerichtet wird. Durch den direkten Zufluss von Wasser kann es zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen! Daher wird empfohlen, den Duschkopf maximal auf Brusthöhe zu halten/einzustellen.

#### BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme

Der BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme wird in die 22 mm Aufnahme einer Trachealkanüle oder eines BMV® Tracheostomapflasters Spezial (Art.-Nr. 137030-XX) gesteckt, Abbildung 1. Ein Duschen ist jetzt möglich, wobei darauf zu achten ist, dass der Wasserstrahl niemals direkt auf den BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme gerichtet wird. Durch den direkten Zufluss von Wasser kann es zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen!

Daher wird empfohlen den Duschkopf maximal auf Brusthöhe zu halten/einzustellen.

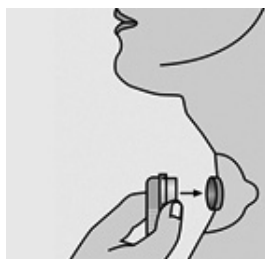

**Abbildung 1:**  
Konnektion des BMV® Duscheschutz für 22 mm Aufnahme auf ein BMV® Tracheostomapflaster Spezial (Art.-Nr. 137030-XX)

#### **Reinigung**

Nach jeder Benutzung muss der BMV® Duscheschutz gründlich unter fließendem handwarmem Wasser (Trinkwasserqualität) gereinigt werden. Dafür kann zusätzlich eine pH-neutrale Waschlotion verwendet werden. Anschließend muss der BMV® Duscheschutz vollständig getrocknet werden, z. B. mit einem fusselfreien Tuch.

#### **Lagerung**

Der BMV® Duscheschutz ist trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

#### **Entsorgung**

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

#### **Rechtliche Hinweise**

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.