



BMV®

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## BMV® KANÜLEN- REINIGUNGSBÜRSTEN

### Artikelnummer Artikelbezeichnung

122010-XX	<b>BMV® Kanülenreinigungsbürste Soft</b> (Größe: 4 – 14 mm)
122020-XX	<b>BMV® Kanülenreinigungsbürste Ultra Soft</b> (Größe: 4 – 14 mm)
122030-XX	<b>BMV® Kanülenreinigungsbürste Soft Light</b> (Größe: 6, 8, 10 mm)

(X = diverse Art.-Nr.)

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen und für die weitere Verwendung aufbewahren!

Produkt „Made in Germany“

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.



BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 23 · 53804 Much  
Telefon: +49 2245 · 610 940  
Kundenservice Telefon: 0800 1826980  
info@bmv-med.de · www.bmv-med.de

920209 Rev. DE0D 2022-08-16

### Piktogramm-Legende



Hersteller



Verwendbar bis



Katalognummer



Vor Sonnenlicht schützen



Chargenbezeichnung



Trocken aufbewahren



Eindeutige Produktidentifizierung



Packungsinhalt



Medizinprodukt



Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung



Zur Wiederverwendung an einem einzelnen Patienten

### Zweckbestimmung

Die BMV® Kanülenreinigungsbürsten sind zum Reinigen von Trachealkanülen zu verwenden.

### Kontraindikationen

Momentan sind für die BMV® Kanülenreinigungsbürsten keine Kontraindikationen bekannt.

### Warnhinweise

Eine falsche Handhabung der BMV® Kanülenreinigungsbürsten kann zu Beschädigungen der Trachealkanüle führen. Sobald eine Trachealkanüle

durch eine falsche Handhabung einer der BMV® Kanülenreinigungsbürsten scharfe Kanten oder Risse aufweist, ist die Trachealkanüle **NICHT** mehr zu verwenden, da es sonst zu Verletzungen der Schleimhäute in der Luftröhre kommen kann!

Es besteht die Gefahr von Infektionen, wenn die verwendete BMV® Kanülenreinigungsbürste nach der Anwendung nicht ausreichend gereinigt wird!

### **Sicherheitshinweise**

Weist eine BMV® Kanülenreinigungsbürste Beschädigungen auf oder ist die Funktionalität beeinträchtigt, darf sie nicht verwendet bzw. muss unverzüglich durch ein neues Produkt gleicher Art ersetzt werden!

Eine BMV® Kanülenreinigungsbürste **NICHT** direkt in das Tracheostoma einführen! Die Kanüle **MUSS** für die Reinigung aus dem Tracheostoma entfernt werden!

Jeglicher Wiedereinsatz bei anderen Patienten, auch nach einer Reinigung der verwendeten BMV® Kanülenreinigungsbürste ist unzulässig!

### **Beschreibung**

BMV® Kanülenreinigungsbürsten werden für die Vorreinigung von Trachealkanülen (Innen-/Außenkanüle) und/oder zur Entfernung von Sekretresten, die nach der Intensivreinigung (z. B. mit BMV® Kanülenreinigungspulver, Art.-Nr. 121001) noch im Kanülenrohr haften, verwendet.

### **Nutzungsdauer**

BMV® Kanülenreinigungsbürsten sind Ein-Patienten-Produkte, welche bei einem einzelnen Patienten auch zur Mehrfachverwendung bestimmt sind.

Die Dauer der Verwendung einer BMV® Kanülenreinigungsbürste unterliegt verschiedenen Einflüssen. Hier sind die Anwendung und die sofortige, gründliche Reinigung sowie die Aufbewahrung von besonderer Bedeutung. Es wird empfohlen, die verwendete BMV® Kanülenreinigungsbürste im Abstand von 2 – 7 Tagen auszutauschen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Borsten abgenutzt oder verklebt sind!

### **Anwendung**

Für die Reinigung **MUSS** die Trachealkanüle aus dem Tracheostoma entfernt werden. Innen- und Außenkanüle sind jeweils einzeln zu reinigen. Zum Reinigen wird die zu verwendende BMV® Kanülenreinigungsbürste entsprechend dem Kanülenbogen vorgebogen. Die Reinigung selbst erfolgt unter fließendem, handwarmem Wasser (Trinkwasserqualität!). Dabei wird die angepasste BMV® Kanülenreinigungsbürste in die Kanüle von der Kanülenspitze (d. h. vom unteren Ende) aus eingeführt. Durch Hin- und Herbewegen der BMV® Kanülenreinigungsbürste wird die Kanüle gereinigt. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung sehr vorsichtig erfolgt, um Beschädigungen an der Kanüle zu vermeiden!

### **Reinigung**

Die verwendete BMV® Kanülenreinigungsbürste ist umgehend nach jeder Anwendung gründlich unter fließendem Wasser (Trinkwasserqualität!) abzuspülen und trocken aufzubewahren.

### **Lagerung**

Die BMV® Kanülenreinigungsbürsten sind trocken aufzubewahren und vor Sonnenlicht zu schützen.

### **Entsorgung**

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

### **Rechtliche Hinweise**

Bei Änderungen am Produkt durch den Anwender sowie Anwendungen außerhalb des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anwendungsbereiches erlischt der Garantie- und Haftungsanspruch dem Hersteller gegenüber.

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.