



# PRODUKTDATENBLATT

## BMV® FIX IT SMALL



Die BMV® Fixation dient zur besseren Ausrichtung einer Trachealkanüle bei Vorhandensein einer problematischen Tracheostomaöffnung bei tracheotomierten Patienten.

Schematische Darstellung der Montage:

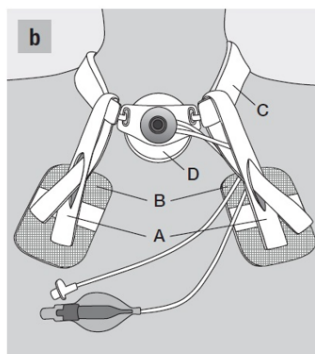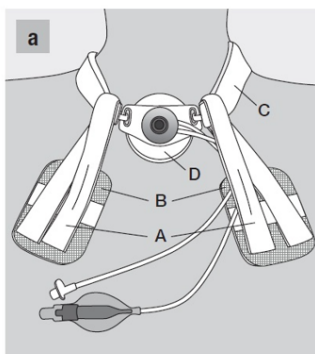

BMV® FiX IT SMALL - Komponenten:

A = BMV® Schaumstoffflaschen (12 Stück)

B = BMV® Pflasterpads (12 Stück)

C = BMV® Kanülentrageband Klett 2-teilig (1 Stück)

D = BMV® Kanülendichtring Foam (1 Stück)

Anbringen der BMV® Fixation unter Verwendung einer BMV® Cuff-Trachealkanüle:

*Variante a:* Fixierung der Schaumstoffflaschen ohne Verwendung des vorhandenen Schlitzes in den Laschen

*Variante b:* Fixierung der Schaumstoffflaschen unter Verwendung des vorhandenen Schlitzes in den Laschen



### Bestellinformationen:

**Lieferumfang:** Inhalt eines Kartons ausreichend für 6 Anwendungen; inkl. 1x Trageband, 1x Kanülendichtring

| Artikel-Nr. | Bezeichnung       | PZN      |
|-------------|-------------------|----------|
| 112080      | BMV® FIX IT SMALL | 19392652 |

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH.

Produkt „Made in Germany“

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH  
Gewerbegebiet Bitzen 21-23  
53804 Much, Germany

Telefon: +49 2245 610940  
info@bm-med.de · www.bmv-med.de